


使用指南 點滴管加溫器

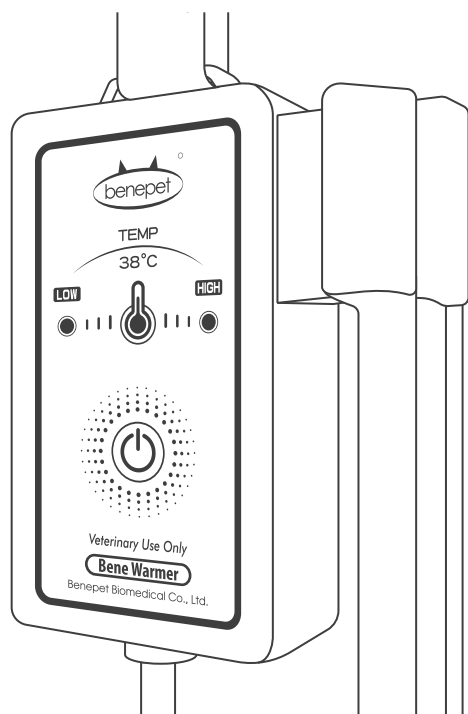

過熱警報



過熱保護



燈號提示



免耗材



吊繩設計



益寵生醫



官方網站



FB粉絲團


益寵生醫股份有限公司

service@benepet.com

www.benepet.com

02.7708.3899

本產品僅供動物使用非人類使用

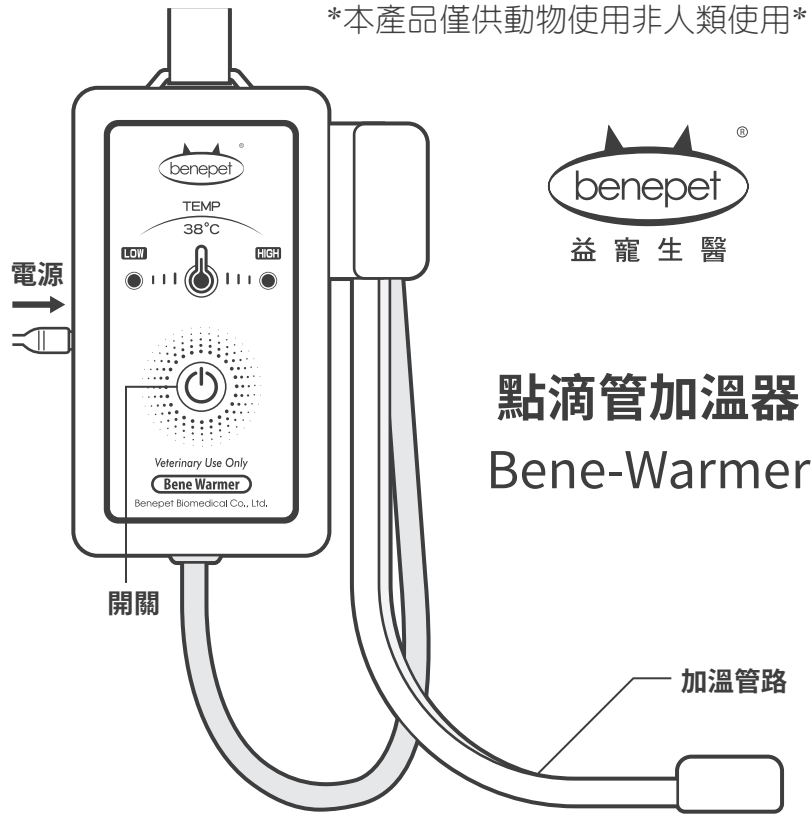

點滴管加溫器 Bene-Warmer

三種LED提示燈分別所表示的工作狀態

黃色加熱燈：溫度低於38°C，正在加溫中。

綠色保溫燈：溫度維持在38±1°C。


紅色高熱燈：溫度高於42°C會自動將加熱器斷電並伴隨警報聲提醒。

(需重新開啓電源才可繼續加熱並解除警報)

請勿在高溫環境下使用

使用方法

將點滴塞入加溫管內，接上電源後按下電源開關即可持續對輸液點滴進行加溫

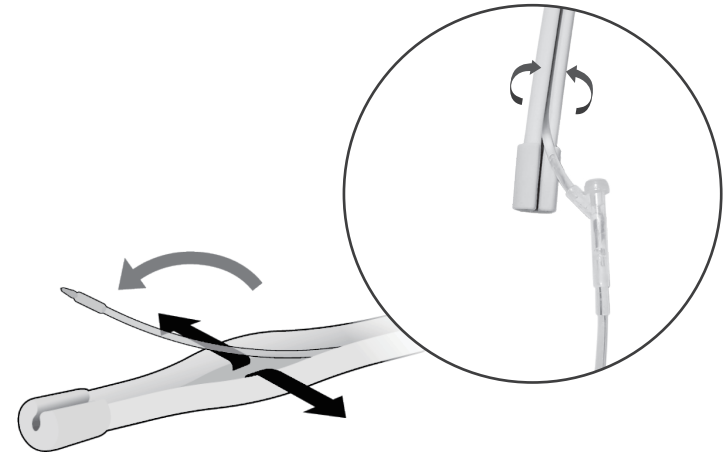

保固範圍

- 1.本產品自購買後享有一年保固服務。
- 2.本保固僅適用於產品主體，不包括配件如吊繩、夾子、電源線、變壓器等。
- 3.本保固服務為有限保固，僅對產品於正常使用下，產生之故障，提供必要之修復行為，恢復產品正常功能。
4. 因人為不當使用或意外、動物撕咬或是不當外力破壞、災害等因素所造成的損壞，不在保固服務範圍。

本產品僅供動物使用非人類使用